



COVID-19 – Coronavirus

Čištění a dezinfekce 3M™ ochranných brýlí a bezpečnostních štítů

Co společnost 3M doporučuje pro čištění ochranných brýlí?

Čistěte ochranné brýle a bezpečnostní štíty tekoucí vodou a jemným mýdlem (pH neutrální mýdlo, pH 6 až 8) bez vosků nebo tuků (vosky, oleje a mastnota vedou k usazování filmu, který by mohl narušit vlastnosti proti zamlžení). Opláchněte brýle čistou vodou, setřete přebytečnou vodu a nechte uschnout na vzduchu.

Upozornění: Při čištění se vyhněte namáčení nebo nadměrnému otírání čoček.

Co společnost 3M doporučuje pro dezinfekci ochranných brýlí?

Vhodným dezinfekčním prostředkem pro brýle a štíty je zředěný roztok chlornanu sodného (domácí bělidlo 5,75 až 6% chlornan sodný):

K výrobě zředěného roztoku vhodného k dezinfekci brýlí a štítů:

1. Smíchejte 3/4 hrnku domácího bělidla se 4 litry teplé vody.
2. Ponořte brýle a štíty do roztoku a nechte je namočené po dobu 5 minut.
3. Opláchněte brýle a štíty čistou, teplou vodou, osušte přebytečnou vodu bavlněným ručníkem a usušte na vzduchu v čisté nekontaminované atmosféře. Zajistěte, aby se pásky při sušení nedotýkaly čoček.
4. Pokud se brýle nepoužívají, uložte je mimo kontaminované oblasti.

Poznámka: Dezinfekční schopnost bělicích roztoků při skladování klesá. Při přípravě roztoku používejte čerstvou lahvičku bělidla a denně doplňujte čerstvý roztok.

Vezměte prosím na vědomí, že některé vlastnosti, jako je např. ochrana zamlžování, se mohou po opakovaném čištění snížit.